


ガイドドサージェリー インスツルメント


Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal™




追加のドリルは既存のキットに収納可能！

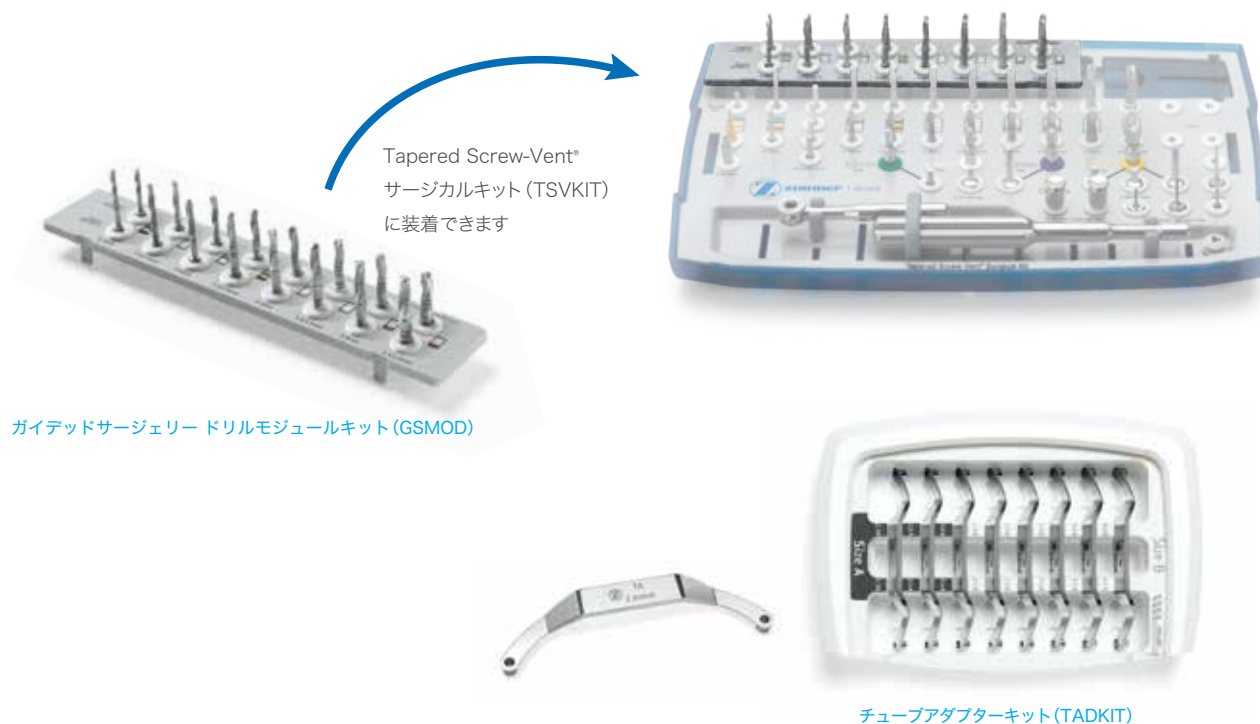



ガイドドサージェリー ドリルモジュールキット (GSMOD)

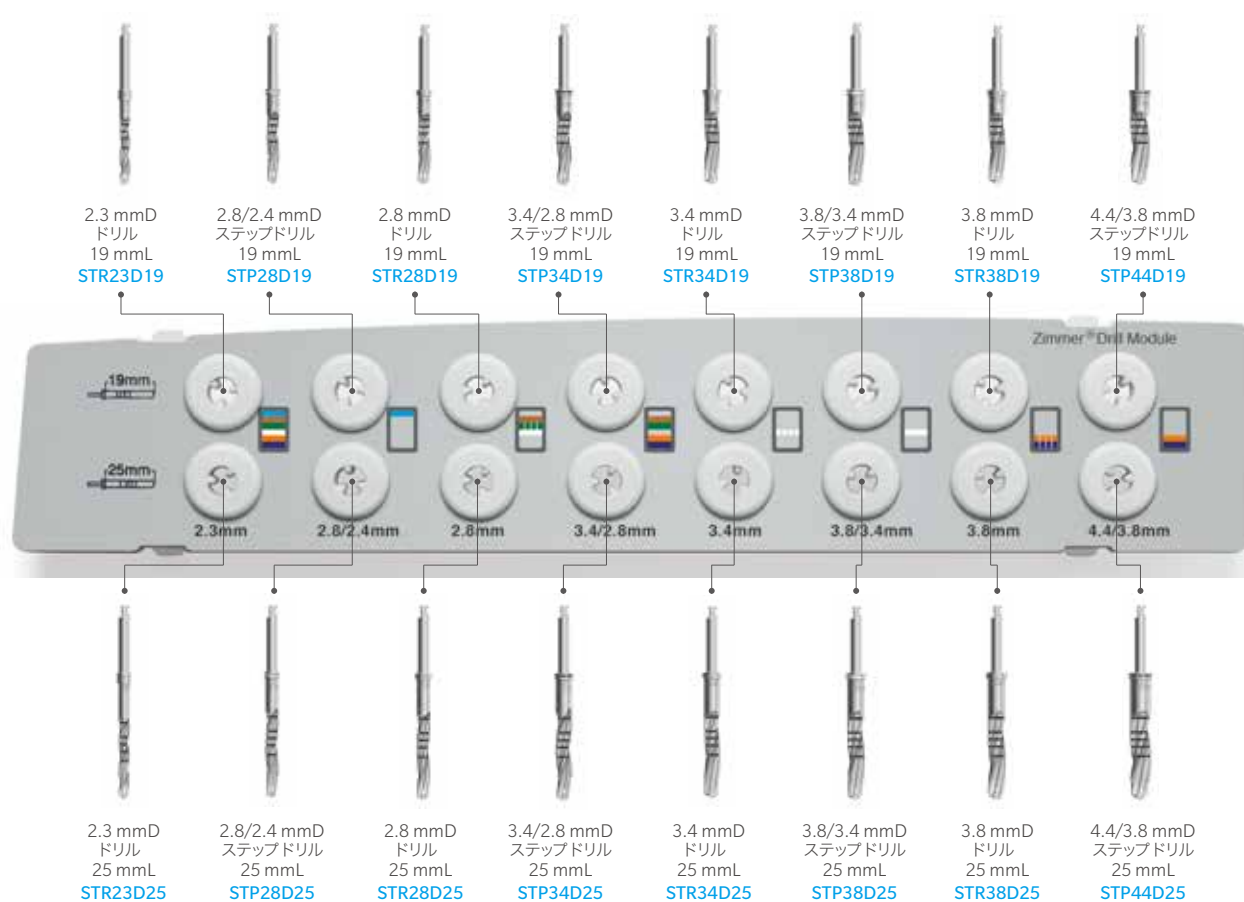

1 種のドリルに 4 つの長さ !

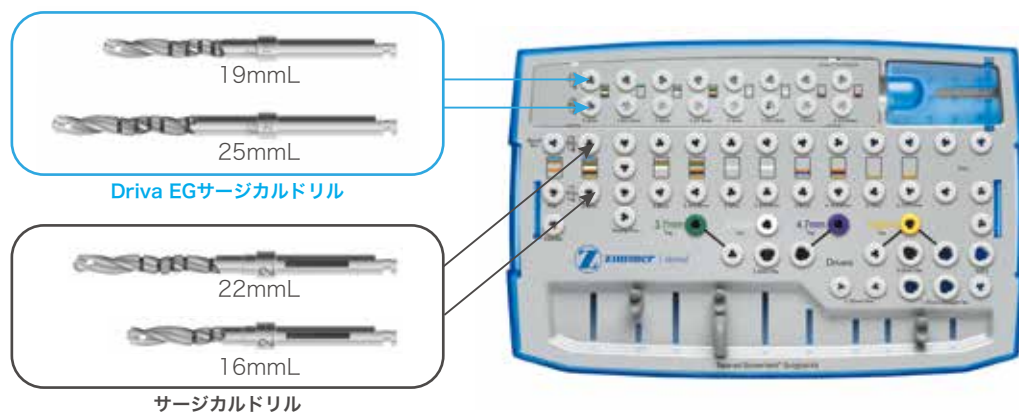

内部注水ドリルによる効率的な注水・冷却 !

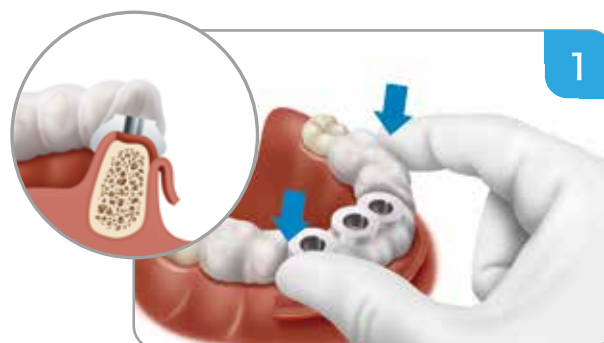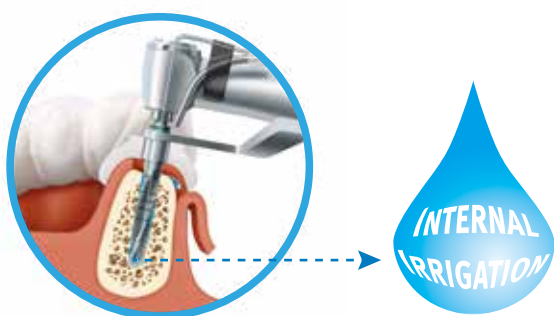

1. サージカルガイドの装着




2. 埋入窩の形成
(2.3mmD ドリル + アダプター 2.3A)



3. 埋入窩の拡大
(2.8mmD ドリル + アダプター 2.8A)



4. 埋入窩の拡大
(3.4/2.8mmD ステップドリル + アダプター 3.4A)

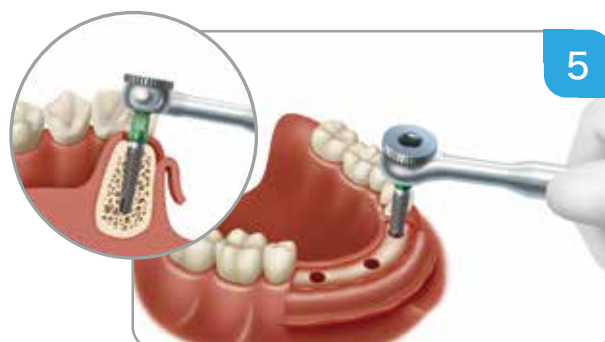

5. ボーンタップまたはインプラントの埋入
(サージカルガイドを外し、通常の埋入手順に従う)

ガイドッドサージェリー インストルメント

・対応：Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal™

	製品名	製品番号
	ガイドッドサージェリー ドリルモジュールキット ・キット内容：下記ドリル各1個がインサート (GSTRAY) にセットされています。 ・Tapered Screw-Vent® サージカルキット (TSVKIT) に装着できます。	GSMOD
	Driva EGサージカルドリル 2.3 mmD - 19 mmL	STR23D19
	Driva EGサージカルドリル 2.3 mmD - 25 mmL	STR23D25
	Driva EGサージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 19 mmL	STP28D19
	Driva EGサージカルステップドリル 2.8/2.4 mmD - 25 mmL	STP28D25
	Driva EGサージカルドリル 2.8 mmD - 19 mmL	STR28D19
	Driva EGサージカルドリル 2.8 mmD - 25 mmL	STR28D25
	Driva EGサージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 19 mmL	STP34D19
	Driva EGサージカルステップドリル 3.4/2.8 mmD - 25 mmL	STP34D25
	Driva EGサージカルドリル 3.4 mmD - 19 mmL	STR34D19
	Driva EGサージカルドリル 3.4 mmD - 25 mmL	STR34D25
	Driva EGサージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 19 mmL	STP38D19
	Driva EGサージカルステップドリル 3.8/3.4 mmD - 25 mmL	STP38D25
	Driva EGサージカルドリル 3.8 mmD - 19 mmL	STR38D19
	Driva EGサージカルドリル 3.8 mmD - 25 mmL	STR38D25
	Driva EGサージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 19 mmL	STP44D19
	Driva EGサージカルステップドリル 4.4/3.8 mmD - 25 mmL	STP44D25
	ガイドッドサージェリー ドリルモジュールインサート	GSTRAY

※ガイドッドサージェリー インストルメントは、6.0mmDインプラントには対応していません。

	チューブアダプターキット ・キット内容：下記のチューブアダプター各1個が同梱されています。	TADKIT
	チューブアダプター A / 2.3 mmD	TAD23A
	チューブアダプター A / 2.8 mmD	TAD28A
	チューブアダプター A / 3.4 mmD	TAD34A
	チューブアダプター B / 2.3 mmD	TAD23B
	チューブアダプター B / 2.8 mmD	TAD28B
	チューブアダプター B / 3.4 mmD	TAD34B
	チューブアダプター B / 3.8 mmD	TAD38B
	チューブアダプター B / 4.4 mmD	TAD44B

= 受注発注品となります。

販売名：TSVサージカルツール 届出番号：13B1X00079000055

●製造元 Zimmer Biomet ●製造販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社



ZIMMER BIOMET
ジンマー・バイオメット・デンタル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2021 Zimmer Biomet Dental G.K. All rights reserved. ZBD0239 2021/11